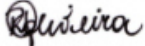
	<b>Instruções para coleta de Swab bucal</b>			
	<b>Código</b>	IT0059	<b>Versão</b>	1
	<b>Situação</b>	Aprovado	<b>Página</b>	1/1

## Procedimentos

1. Retirar o swab da embalagem segurando a haste e sem tocar na área de coleta.
2. Segurar a haste do swab e colocá-lo dentro da boca.
3. Friccionar com um lado do coletor a parte interna da bochecha por pelo menos 40 segundos, passando o swab pela dobra da bochecha com a gengiva. Não encoste o swab nos dentes.
4. Repetir a operação com o outro lado do swab na outra bochecha

## Importante

- Após a coleta, armazenar o swab no envelope/tubo apropriado.
- O paciente não deve fumar ou ingerir alimentos 30 minutos antes da coleta, ou deve-se enxaguar a boca com água antes da coleta.
- Não escovar os dentes ou utilizar enxaguante bucal a base de álcool.
- Manusear o swab utilizando luvas. Nunca tocar na área de coleta do swab.

	<b>Elaboração</b>	<b>Aprovação</b>
<b>Data</b>	02/10/2017	06/10/2017
<b>Assinaturas</b>	 <b>Raquel A. Fabreti de Oliveira</b> BSc, CHS, MSc CRBio 37234/04-D Bióloga Geneticista e Imunologista de Transplantes Diretora Técnica Supervisora	 <b>Dr. Evaldo Nascimento</b> BSc, MD, CHS, PhD CRM MG 33.132 Médico Imunologista de Transplantes Diretor Responsável Técnico